


Näin teet Hyvinvointianalyysin uudelle asiakkaallesi käyttäen Firstbeat Center+ -palvelua


Toimenpiteet ennen mittausta

1. Kirjaudu sisään Hyvinvointianalyysiin osoitteessa www.hyvinvointianalyysi.fi.
2. Valitse sivun oikeasta ylänurkasta Käyttäjätili → Omat asetukset. Valitse Asetukset -välilehti. Lisää valintamerkki () Läheta ilmoitus sähköpostiin, Firstbeat Center+ -palvelussa -kohtaan. Klikkaa Tallenna. (Tämä toiminto tarvitsee tehdä vain kerran. Voit jatkossa siirtyä kohdan 1 jälkeen suoraan kohtaan 3.)
3. Luo uusi hyvinvointianalyysi:
 - a. Valitse Uusi hyvinvointianalyysi. → Valitse Hyvinvointianalyysi uudelle asiakkaalle.

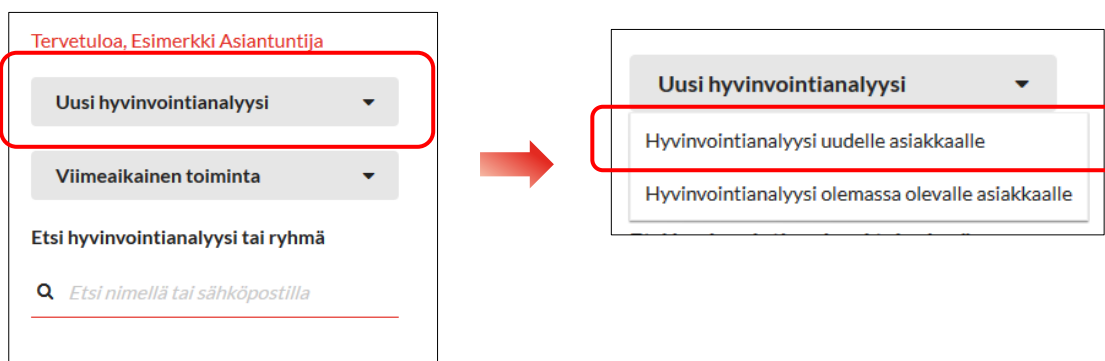


The screenshot shows a user interface with a header 'Tervetuloa, Esimerkki Asiantuntija'. Below the header, there are two main menu items: 'Uusi hyvinvointianalyysi' and 'Viimeaikainen toiminta'. The 'Uusi hyvinvointianalyysi' item is highlighted with a red box. An arrow points to a dropdown menu that is open, showing two options: 'Hyvinvointianalyysi uudelle asiakkaalle' and 'Hyvinvointianalyysi olemassa olevalle asiakkaalle'. The first option is also highlighted with a red box.

- b. Valitse Firstbeat Center+ käytössä.

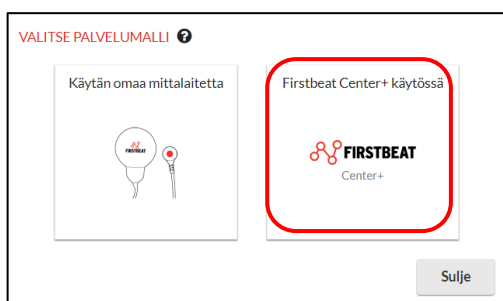

The screenshot shows a section titled 'VALITSE PALVELUMALLI'. There are two options: 'Käytän omaa mittalaitetta' and 'Firstbeat Center+ käytössä'. The 'Firstbeat Center+ käytössä' option is highlighted with a red box. Below the options, there is a 'Sulje' button.

- c. Lisää asiakkaan sähköpostiosoite ja aseta mieleisesi tilauslinkin lähety- ja viimeinen voimassaolopäivä.

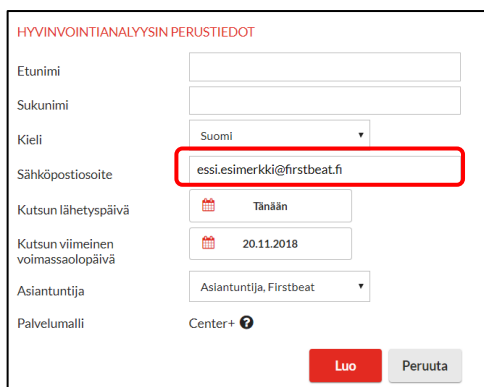



The screenshot shows a form titled 'HYVINVOINTIANALYYSIN PERUSTIEDOT'. The form contains several fields: 'Etunimi', 'Sukunimi', 'Kieli' (set to 'Suomi'), 'Sähköpostiosoite' (with the value 'essi.esimerkki@firstbeat.fi' highlighted in a red box), 'Kutsun lähetyspäivä' (set to 'Tänään'), 'Kutsun viimeinen voimassaolopäivä' (set to '20.11.2018'), 'Asiantuntija' (set to 'Asiantuntija, Firstbeat'), and 'Palvelumalli' (set to 'Center+'). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Luo' and 'Peruuta'.


4. (Asiakkaasi tehtyä tilauksen Firstbeat Center toimittaa asiakkaallesi mittalaitteen lisäksi riittävän määrän elektrodeja, standardoidun saatekirjeen, jossa on mittauksen ohjeistus sekä palautuskuoren. Asiakas saa myös erillisen sähköpostin, jossa on linkki hänen taustatietoihin ja päiväkirjaan.)
5. Voit kirjautua ulos Hyvinvointianalyysista.

Toimenpiteet mittauksen jälkeen


1. Saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun Firstbeat Center on analysoinut sekä luonut raportin asiakkaasi mittausdatasta. Firstbeat Centerin luomista raporteista saat ilmoitukset myös Hyvinvointianalyysin etusivullesi. Kirjautu Hyvinvointianalyysiin ja klikkaa ilmoituspainiketta näkymän oikeassa ylänurkassa.

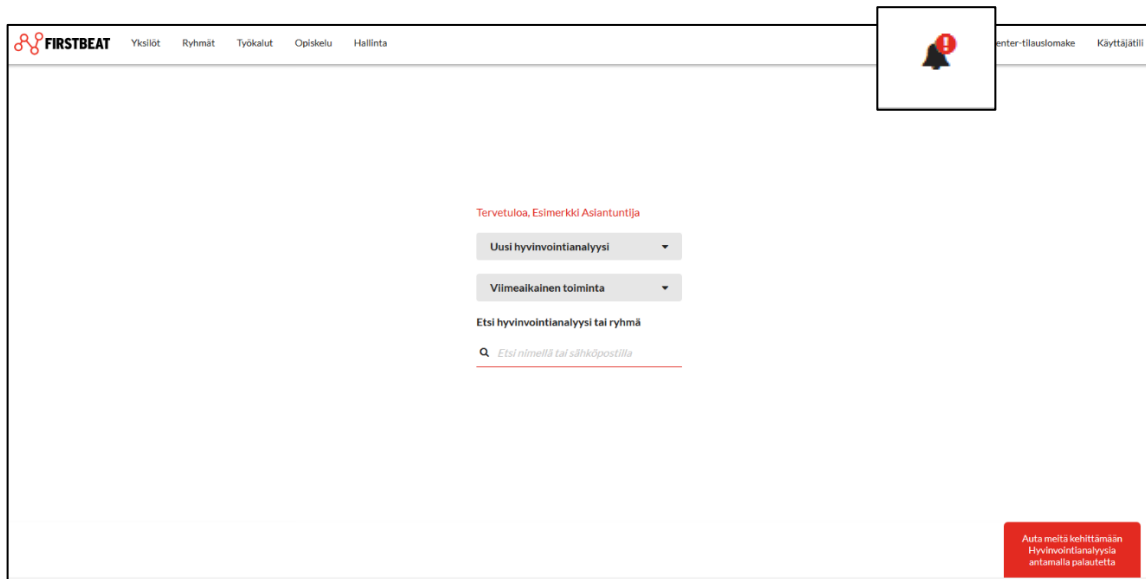

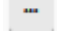2. Klikkaa mittauksesi Hyvinvointianalyysi -riviltä, *Toiminnot* -sarakeesta  -painiketta ja valitse avautuneesta alavalikosta *Avaa hyvinvointianalyysi*.

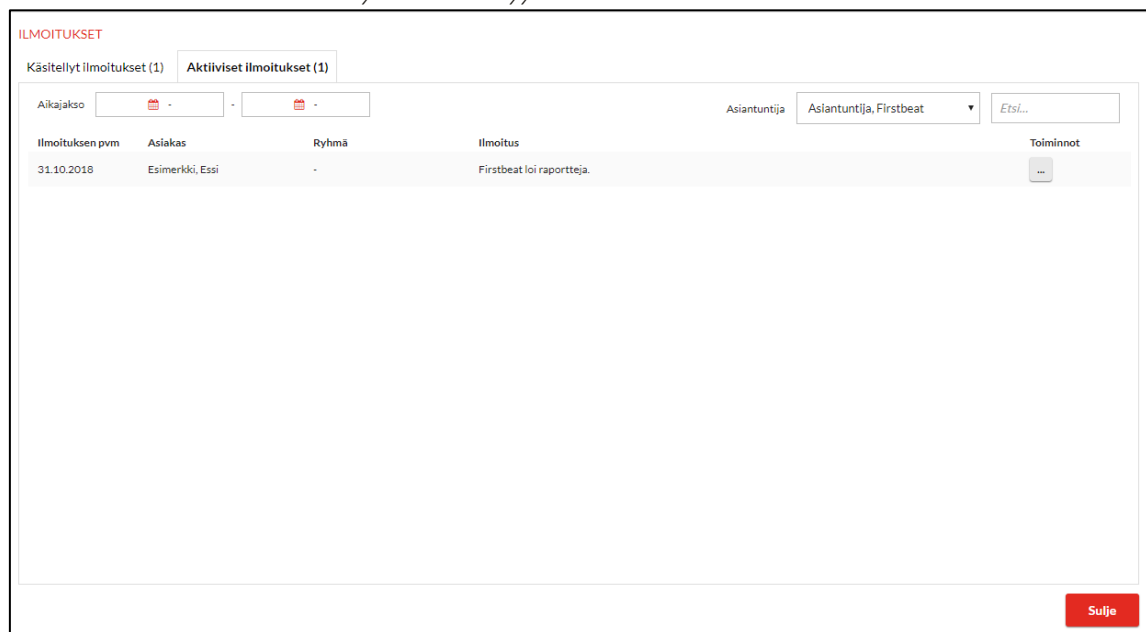

- Avattuasia asiakkaasi kartoituksen voi siirtyä raportit -välilehdelle, josta löydät Firstbeatin luomat raportit asiakkaasi tuloksista. Tutustu ensin asiakkaasi raportteihin avaamalla ne (tarkista, että selaimesi sallii pop-up-ikkunoiden avaamisen). Tämän jälkeen voit lähettää raportit sähköisenä suoraan ohjelmasta PDF muodossa asiakkaan tai omaan sähköpostiisi. HUOM asiantuntijan raporttia ei saa lähettää asiakkaalle, vaan asiantuntija käyttää sitä ainoastaan oman työnsä tukena.

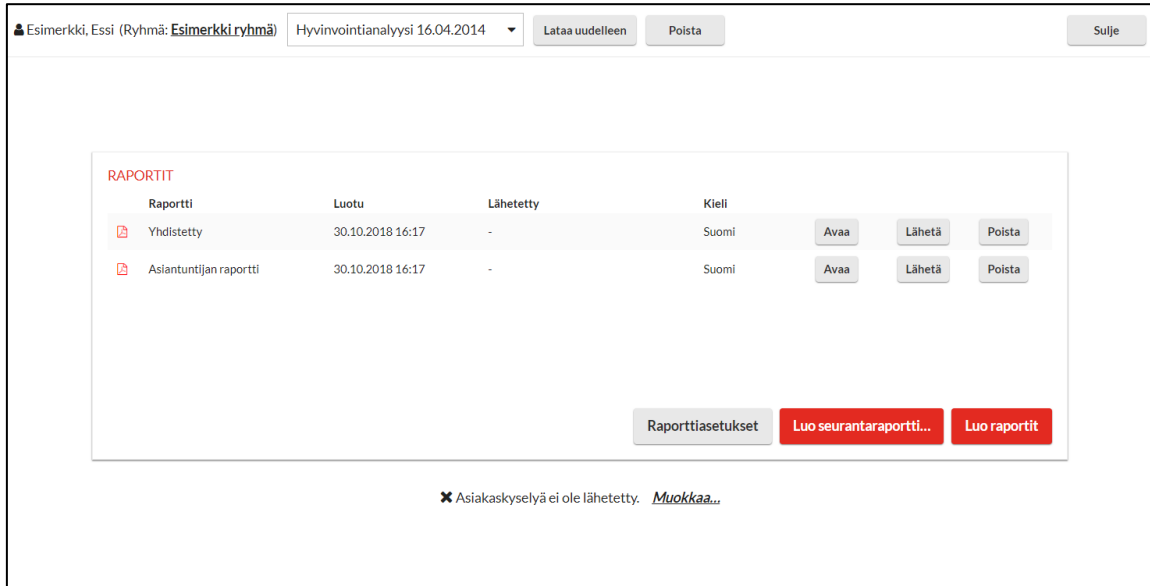

The screenshot shows a web interface for reporting. At the top, there is a header with a user profile 'Esimerkki, Essi (Ryhmä: Esimerkki ryhmä)', a dropdown menu 'Hyvinvointianalyysi 16.04.2014', and buttons 'Lataa uudelleen' and 'Poista'. A 'Sulje' button is in the top right corner. Below the header is a table titled 'RAPORTIT' with columns: Raportti, Luotu, Lähetetty, and Kieli. There are two rows of reports. Each row has three buttons: 'Avaa', 'Lähetä', and 'Poista'. Below the table are three buttons: 'Raporttiasetukset', 'Luo seurantaraportti...', and 'Luo raportit'. At the bottom, there is a message: '❌ Asiakaskyselyä ei ole lähetetty. [Muokkaa...](#)'

Raportti	Luotu	Lähetetty	Kieli	Avaa	Lähetä	Poista
Yhdistetty	30.10.2018 16:17	-	Suomi	Avaa	Lähetä	Poista
Asiantuntijan raportti	30.10.2018 16:17	-	Suomi	Avaa	Lähetä	Poista

- Päiset tarkastelemaan ja muokkaamaan asiakkaasi mittausdataa "mittaukset"-välilehdeltä ja taustatietoja "asiakkaan tiedot"-välilehdeltä.
- Tutustu raportteihin ja tulosta/tallenna ne tarpeen mukaan. Lisää apua raportin tulkintaan sekä niiden luomiseen löydät Oppimisympäristöstä: *Opiskelu > Oppimisympäristö*.

Koulutuksiin liittyvissä asioissa palvelee:
Marita Hämäläinen, koulutuskoordinaattori
marita.hamalainen@firstbeat.fi
puh. 020 7631 673 (ark. 8 - 16)

Ongelmatilanteissa palvelee:
Firstbeat Tuotetuki
tuotetuki@firstbeat.fi
puh. 08 451 451 41 (ark. 9 – 16)